



BIOTECH DENTAL

Pluryal

UNA GAMA COMPLETA
DE COSMÉTICOS, PARA LA
EXPERIENCIA ANTIEDAD

BIOTECH DENTAL
PLURYL



Contenido

DESCUBRA UNA NUEVA TÉCNICA PARA LA SONRISA DE SUS PACIENTES	p.4
LA CIENCIA DETRÁS DE PLURYL[®]	p.5
UNA NUEVA GENERACIÓN DE RELLENOS A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO	p.7
SEGURIDAD PLURYL[®] COMPLETA	p.8
COMODIDAD DE MANEJO ÓPTIMA	p.9
FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA PARA CIRUJANOS DENTALES	p.10

Descubra una nueva técnica para la sonrisa de sus pacientes

«El relleno dérmico con fines terapéuticos mediante inyecciones de ácido hialurónico, está dentro de su campo de especialización».

ORDEN NACIONAL FRANCESA DE CIRUJANOS DENTALES

Biotech Dental ofrece una nueva generación de rellenos a base de ácido hialurónico, compatibles con su práctica dental*.

Los productos Pluryal® fabricados por MD Skin Solutions, garantizan resultados seguros, eficaces y duraderos.

**Sujetos a una formación específica en técnicas de inyección intradérmica.*

RECUERDE:

- Las inyecciones de ácido hialurónico están dentro de la capacidad técnica de los cirujanos dentales, siempre que hayan recibido la formación adecuada;
- Esta solución cosmética presenta un beneficio real para los pacientes, en términos del servicio médico prestado, y satisface la creciente demanda de los procedimientos cosméticos;
- Las inyecciones de ácido hialurónico tienen plena autorización legal con obligación reforzada de medios.

ACERCA MD SKIN SOLUTIONS

- Con sede en Luxemburgo, MD Skin Solutions desarrolla productos antienvjecimiento, basados en investigaciones de vanguardia, que brindan resultados efectivos para los profesionales;
- Expertos en soluciones antienvjecimiento;
- Certificado ISO 13485 y marcado CE, compatible con los estándares europeos para fabricantes de dispositivos;
- Presente en más de 40 países.

La ciencia detrás de Pluryal®

CUATRO PRODUCTOS VERSÁTILES



Pluryal®
CLASSIC



Pluryal®
CLASSIC LIDOCAINE



Pluryal®
VOLUME



Pluryal®
VOLUME LIDOCAINE

VENTAJAS

- Ácido hialurónico monofásico reticulado;
- Origen no animal (bacteriano);
- Basado en el concepto de fabricación P.R.E.M.I.U.M;
- Cumple con los procedimientos de esterilización más estrictos;

CERTIFICADO ISO 13485 Y MARCADO CE.



Una nueva generación de rellenos a base de ácido hialurónico

Pluryal® CLASSIC y Pluryal® CLASSIC LIDOCAINE



Corrige pliegues y arrugas nasolabiales moderadas y aumenta el volumen de los labios.

PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN: Dermis media a profunda, mucosa/labios.

CRUCE: BDDE +++

% ÁCIDO HIALURÓNICO NO CRUZADO: 10 %

FRECUENCIA: Cada 6 - 9 meses.

INCLUYE:

1 x 1 ml
2 x 27 G½ - Aguja ultrafinas
Instrucciones de uso
2 etiquetas de trazabilidad

Pluryal® VOLUME y Pluryal® VOLUME LIDOCAINE



Corrige los pliegues y arrugas nasolabiales más profundos, aumenta o restaura el volumen, remodela los contornos.

PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN: Dermis profunda o hipodermis.

CRUCE: BDDE ++++

% ÁCIDO HIALURÓNICO NO CRUZADO: 5 %

FRECUENCIA: Cada 12 - 16 meses.

INCLUYE:

1 x 1 ml
2 x 27 G½ - Aguja ultrafinas
Instrucciones de uso
2 etiquetas de trazabilidad

LIDOCAINA

LA LIDOCAINA ES UN POTENTE ANESTÉSICO Y CON NIVELES DE HASTA EL 0.3 % , HACE LAS INYECCIONES MÁS CÓMODAS PARA LOS PACIENTES Y GARANTIZA RESULTADOS NATURALES, SEGUROS Y DURADEROS.

Seguridad Pluryal® completa

- Gel preparado en sala blanca, de acuerdo con la norma ISO 14644;
- Control completo de los parámetros de reticulación del ácido hialurónico como la temperatura, el medio ambiente, etc;
- Pruebas de residuos de proteínas y endotoxinas durante el proceso de validación;
- Esterilización extremadamente rigurosa: todos los productos se esterilizan en autoclave y se envasan en condiciones estériles;
- Pruebas de residuos de proteínas y endotoxinas durante el proceso de validación;
- Los niveles más bajos de BDDE, que cumplen con los estrictos estándares de la FDA (0,4 ppm).

Pluryal® Classic y Pluryal® Volume certificado **CE 0481**.

Pluryal® Classic Lidocaine y Pluryal® Volume Lidocaine certificado **CE 0120**.



Comodidad de manejo

- 1 — **GEL CON ALTA ELASTICIDAD**
Inyección suave
- 2 — **JERINGUILLA CORTA DE VIDRIO**
Manejo mejorado y mayor consistencia
- 3 — **JERINGUILLA GRADUADA**
Control del volumen inyectado
- 4 — **ANCHO AGARRE GIRATORIO (ROTACIÓN DE 360°)**
Comodidad óptima
- 5 — **AGUJA LUER-LOCK**
Sin pérdida de producto
- 6 — **FUERZA DE INYECCIÓN HOMOGÉNEA**
Consistencia y control durante la duración del tratamiento

Formación teórica y práctica para cirujanos dentales

BIOTECH DENTAL ACADEMY

Biotech Dental Academy ofrece formación en técnicas de inyección de ácido hialurónico, solución venerada en la medicina cosmética.

Ofrezca a sus pacientes una transformación natural y visible al instante.
Ahora es posible actuar sobre los efectos del envejecimiento cutáneo.
¡No espere más, capacítate!

PARIS

BIOTECH DENTAL ACADEMY

36, Rue des Petits-Champs
75002 Paris

Tel.: +33 (0)6 26 30 40 46

h.bennaim@biotech-dental.com

SALON-DE-PROVENCE

BIOTECH DENTAL ACADEMY

305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence

Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60

Fax: +33 (0)4 90 44 60 61

c.coullomb@biotech-dental.com

ESPAÑA

BIOTECH DENTAL ACADEMY

Avda. Juan Caramuel, 1
28919 Móstoles (Madrid)

Tel.: +34 911 930 210

info-spain@biotech-dental.com

academy.biotech-dental.com

Pluryal®, Pluryal® Volume, Pluryal® Lidocaine y Pluryal® Volume Lidocaine
son dispositivos médicos inyectables de clase III, su uso está estrictamente restringido a
médicos autorizados que hayan recibido capacitación específica en inyecciones de relleno dérmico.





BIOTECH DENTAL

ESPAÑA

Avda. Juan Caramuel, 1
28919 Leganés (Madrid)

Tel. : +34 911 930 210

info-spain@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

PLU-BR-ES_Rév.00_04/2021
19/4/BD/PM/001

Fabricante Pluryal®: MD Skin Solutions - Distribuidor: Biotech Dental.

Biotech Dental - Sociedad de responsabilidad limitada con un capital de 24.866.417 € - RCS Salon de Provence: 795001304 - SIRET: 795001304 00018
CIF: FR 31 79 500 13 04. Geles de relleno dérmicos, para inyecciones en la piel del rostro. El tratamiento con rellenos puede requerir varios retoques a lo largo del tiempo, para lograr los resultados deseados. Dispositivo médico de clase III (CE 0499). Las imágenes son solo para información y no son vinculantes. No la basura. Impreso por: VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.